

# **Arbeitsanweisung zur Durchführung eines Nasenabstrichs**

**Hygienemaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Vorgaben der Hersteller und Richtlinien zur Abfallentsorgung** streng einhalten

## **Schutzkleidung zur Durchführung des Nasenabstriches**

- Einmalschutzkittel
- FFP 2 Maske (oder vergleichbar)
- Schutzbrille oder Face Shield
- Einmalhandschuhe (Handschuhwechsel nach jeder Testung)

**Gelben Abfalleimer zur Abfallentsorgung** bereitstellen

## **Nasenabstrich wenn möglich im Freien durchführen**

(andernfalls auf gute Belüftung achten)

## **Ablauf des Schnelltests mittels Nasenabstrich** (siehe auch Hersteller Anleitung):

- Schutzkleidung anlegen
- Testperson über das Procedere informieren
- Kopf der Testperson ggf. leicht in den Nacken legen
- Verpackungseinheit öffnen und den Tupfer entnehmen (nur am Stab anfassen)
- Tupfer vorsichtig nacheinander in beide Nasenlöcher einführen (kein tiefer Rachenabstrich!)
- Tupfer in beiden vorderen Nasenhöhlen mehrmals an der Nasenwand (Schleimhaut) abstreichen
- Tupfer in das geöffnete Entnahmeröhrchen mit der Flüssigkeit (Eppendorf-Gefäß mit der Pufferlösung) stecken und Tupfer in der Pufferlösung auswaschen. Siehe hierzu auch Hersteller Anleitung des Schnelltest.
- Entsprechende Tropfenanzahl aus dem Eppendorf-Gefäß auf den für die Probe vorgesehen Testanteil tropfen. Dieser befindet sich auf der Testkassette ganz unten. Siehe hierzu auch Hersteller Anleitung des Schnelltest.
- Beiliegende Schutzfolie auf das Ablesefenster der Testkassette kleben, um eventuelle Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach 15-30min kann das Testergebnis abgelesen werden.
- kompletten Abfall sofort im gelben Abfalleimer entsorgen